

## 5 Larm och säkerhetsfunktioner

### Vid larm:



Ljudlöst larm (vid behov)


Ta reda på orsaken och vidta åtgärder



Bekräfta larmet




Fortsätt matningen

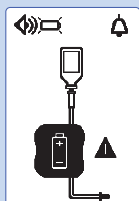


#### Batteriet tomt

Anslut genast pumpen till elnätet.

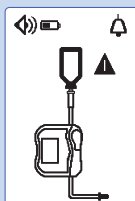


#### Larm, tom påse/luft i aggregatet

Byt behållare och kontrollera om det finns luftbubblor.

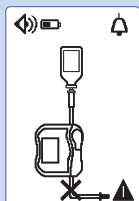


#### Larm, ocklusion efter pump

Kontrollera att aggregatet / nutritions sond nedan pump mot patienten är fritt från hinder.

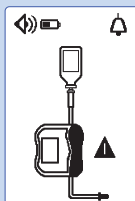

#### Larm, luckan är öppen

Stäng pumpdörren.

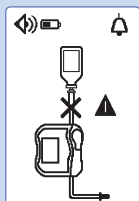


#### Larm, ocklusion före pump

Kontrollera att aggregatet mellan pump och sondnärings-behållare är fritt från hinder.




#### Meddelande om att målvolymen nästan nås

Fortsätt matningen eller avsluta matningen.

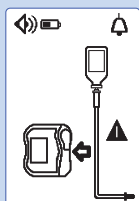


#### Larm, aggregatinstallation

Kontrollera aggregatets läge ovanför och under pumpmekanismen och sätt i det korrekt.

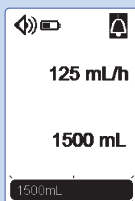


#### Larm, målvolymer har nås

Avsluta matningen.

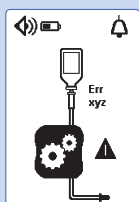

#### Larm, pumpfel

Anteckna felkoden (Err xyz) och kontakta servicepersonalen.

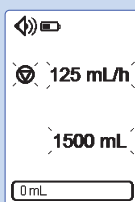

#### Starta påminnelse

Gå till nästa steg eller stäng av pumpen.

## MEDICINSK UTRUSTNING



210316-0-quick\_reference\_guide\_amika\_SE - 022013

# Amika®

SONDMATNINGSPUMP


Snabbguide



Bruksanvisningen måste läsas innan utrustningen används.


På grund av ändringar i standarder, lagtexter och material, kan värden som anges i texten och på bilderna i det här dokumentet endast tillämpas för den utrustning som det medföljer.

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

 Fresenius Kabi AG  
61346 Bad Homburg  
Tyskland  
Telefon +49 (0)6172 686-0  
[www.fresenius-kabi.com](http://www.fresenius-kabi.com)

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

# 1 Installation av aggregatet i pumpen

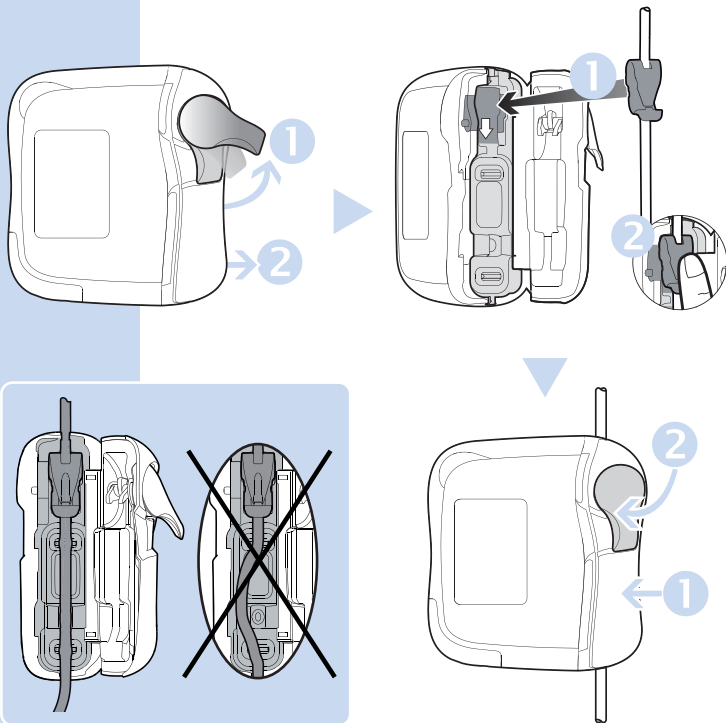

# 2 Beskrivning av gränssnittet




# 3 Funktioner

## 3.1 Slå på pumpen




## 3.2 Fyll aggregatet

Automatisk fyllning (~1 min 45 s)

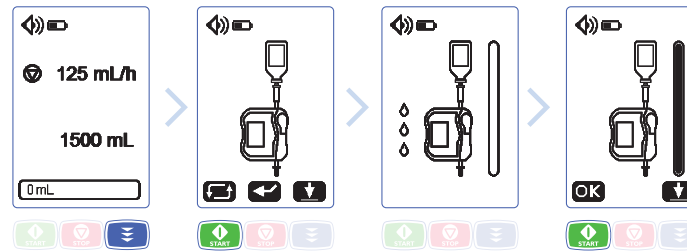

Halvautomatisk fyllning

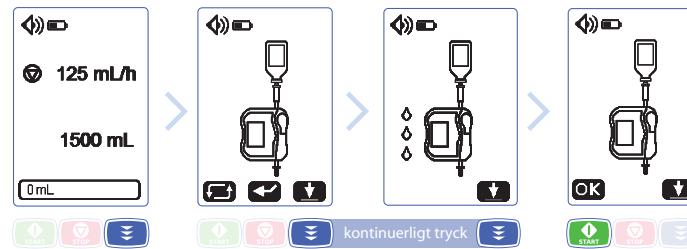

## 3.3 Ställ in flödeshastigheten (mL/h)



## 3.4 Ställ in målvärde för volym (mL)



## 3.5 Starta matningen (fyll först aggregatet)



## 3.6 Stoppa matningen



> 2 s:  
Återställ förloppsindikatorn

Tangentbordslös > 2 s

Stäng av pumpen > 2 s

# 4 Meny

Stoppa matningen



tryck sedan på MENU-knappen



För att bläddra uppåt

För att bläddra nedåt

Ange en meny eller godkänn en åtgärd Gå tillbaka till föregående bild



Aktivera/inaktivera målvolymer



Aktivera/inaktivera nattläge



Ljudinställningar



Aktivera/inaktivera inställningsspärr \*



Matningsvolymmätare



Larmhistorik



Matningshistorik



Kontrast-/ljusstyrkeinställningar



Inställning av tid mellan två larm \*



Inställning av tid mellan meddelande om att målvolymer nästan nåts och målvolymer nåts \*

\* kod krävs